

Corona-Infektionsschutz / Atemschutz

Maske	Beschreibung	Schutzwirkung	Anwendungshinweise
Corona – Infektionsschutz: Diese Masken sind bei zwingender Notwendigkeit der kurzzeitigen Unterschreitung des Mindestabstandes, z.B. in Fluren oder engen Räumen, vorgesehen. Fahrzeuge im UB 4.2 können im begründeten Ausnahmefall (z.B. geländegängiges Fahrzeug erforderlich) von zwei Personen gemeinsam genutzt werden – hier gilt die Maskenpflicht. Kurzzeitige Unterschreitung des Mindestabstandes ist beispielsweise auch gegeben, wenn zwei Elektriker sich unmittelbar vor einem Schalt-schrank abstimmen müssen oder zwei Mechaniker sich vom Schadensbild einer gereinigten Pumpe auf der Werkbank gemeinsam ein Bild machen. Diese Tätigkeiten sind im Allgemeinen innerhalb von weniger als 15 Minuten erledigt. Hier ist Schutz gewährleistet, wenn beide Beschäftigte MNS oder MNB tragen. Einhaltung des Mindestabstandes bleibt grundsätzlich die wichtigste Schutzmaßnahme!			
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB-Masken) 	(Selbstgefertigte) „Community“-Maske, „DIY“-Maske, Behelfs-Maske (z.B. Schal)	Fremdschutz Minderung der Tröpfchenfreisetzung; Minderung von Schmierinfektionen	Personenbezogene Anwendung, Durchfeuchtete Maske austauschen bzw. waschen; nach dem Abnehmen sollte die Maske in einem waschbaren oder Einmal-Beutel aufbewahrt oder sofort bei 60° C gewaschen werden. (Vermeidung von Schimmelbildung) (Die vom WVER ausgegebenen Masken sind mit 60° C waschbar und sollten anschließend gebügelt werden, ohne die Gummibänder zu bügeln.)
Mund-Nasen-Schutz (MNS-Masken) 	Einwegprodukt aus Papier/Vlies	Fremdschutz, geringer Eigenschutz Minderung der Tröpfchenfreisetzung; Minderung von Schmierinfektionen;	Personenbezogene Anwendung, Wiederverwendung bis zu einer Schichtdauer (auch in der Summe bei nur kurzzeitiger Verwendung) möglich. Durchfeuchtete und/oder kontaminierte Maske austauschen; nicht waschbar

Corona-Infektionsschutz / Atemschutz

Maske	Beschreibung	Schutzwirkung	Anwendungshinweise
Umfassender Atemschutz: Diese Masken sind als zugelassene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorwiegend bei Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen (z.B. Legionellen, Fäkalien) vorgesehen. Einhaltung des Mindestabstandes bleibt grundsätzlich die wichtigste Schutzmaßnahme!			
FFP2-Masken (mit/ohne Ventil) 	PSA mit CE-Kennzeichnung oder Sonderzulassung	Schutz vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen; Schutz vor Schmierinfektionen Schutz vor den meisten auf Kläranlagen vorkommenden Krankheitserregern (inkl. Legionellen); Bei einfachen Tätigkeiten in gefährlichen Bereichen zu tragen. <u>Corona-Infektionsschutz:</u> Ohne Ventil: Fremd- und Eigenschutz; Mit Ventil: Eigenschutz, <u>kein</u> Fremdschutz	Entsorgung nach Durchfeuchtung oder Kontamination Wiederverwendung unter bestimmten Umständen möglich (s.u.). Verwendungsdauer: eine Schicht Tragedauer ohne Ventil 75 min, mit Ventil 120 min; Erholungsdauer (Zeit ohne Atemmaske, Arbeiten können fortgeführt werden): 30 min Nicht waschbar
FFP3-Masken (mit/ohne Ventil) 	PSA mit CE-Kennzeichnung oder Sonderzulassung	Schutz vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen, Schutz vor Schmierinfektionen Schutz vor allen auf Kläranlagen vorkommenden Krankheitserregern; Bei Aerosolbildung zu tragen; <u>Corona-Infektionsschutz:</u> Ohne Ventil: Fremd- und Eigenschutz; Mit Ventil: Eigenschutz, <u>kein</u> Fremdschutz	Entsorgung nach Durchfeuchtung oder Kontamination Wiederverwendung unter bestimmten Umständen möglich (s.u.). Verwendungsdauer: eine Schicht Tragedauer ohne Ventil 75 min, mit Ventil 120 min; Erholungsdauer (Zeit ohne Atemmaske, Arbeiten können fortgeführt werden): 30 min Nicht waschbar
Trotz intensivem und ständigem Einsatz des FB Beschaffung ist der Einkauf von FFP-Masken sehr schwierig und unsicher. Seien Sie deshalb fair – nutzen Sie FFP-Masken wirklich nur bei erhöhter Konzentration an biologischen Arbeitsstoffen, also dort, wo die Nutzung auch vor Corona erforderlich war. Die Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten müssen, werden es Ihnen danken.			

Corona-Infektionsschutz / Atemschutz

Hinweise zur Wiederverwendung von Masken (MNS, FFP2, FFP3):

- Händehygiene beachten! (Frisch gewaschene Hände beim Auf- und Absetzen)
- Beim Ab- und Aufsetzen der Maske muss eine Verunreinigung der Innenseite verhindert werden!
- Trockene Aufbewahrung an der Luft (keine geschlossenen Beutel)
- KEINE Desinfektion der Masken mit Flüssigdesinfektionsmitteln! (Wirksamkeit wird negativ beeinträchtigt)
- Persönliche Zuordnung muss gesichert sein!

Treffen sich zwei Maskierte...

